

2023.07

COMPOSITION DU KIT 2



- 1 trousse vide
- 1 garrot tourniquet
- 1 paire de ciseaux coupe-tout
- 1 couverture de survie
- 1 pansement israélien 4 pouces
- 1 pansements israélien 6 pouces
- 2 paires de gants nitrile bleu taille XL
- 1 compresse d'hydrogel Burncare 10cm x 10cm
- 2 bandes nylax 10cm x 3m
- 2 mèches plates compressées (compressed gauze) 11,5cm x 3,7m
- 1 pansement thoracique « Chest seal » 15cm de diamètre
- 1 marqueur noir
- 1 crayon de papier 10cm de longueur
- 1 bande de scotch gris US tissé maille 1,5m x 50mm
- 1 sachet zip 150mm x 200mm
- 1 fiche patient A4 en ukrainien



A étape annexe

FICHE PATIENT + SACHET ZIP



TCCC Картка пораненого

Номер операції: _____ Дата (дд-мм-рр): _____ Час: _____
 Евакуаційна категорія: ☐ Термінова ☐ Пріоритетна ☐ Звичайна
 ПІБ _____ Стать: ☐ Ч ☐ Ж
 Останні 4 цифри особистого номера _____
 Рід військ _____ Підрозділ _____ Алергії _____

Механізм травми (позначити все, що стосується даного випадку)
☐ Артилерійська ☐ Опік ☐ Тула ☐ Падіння ☐ Вогнепальна
☐ Саморобний вибух, пристр. ☐ Міна ☐ ДТП ☐ РПГ
☐ Інше _____

Поранення (позначити все, що стосується даного випадку)

Турнікет П Рука
 Тип _____ Час _____

Турнікет Л Рука
 Тип _____ Час _____

Турнікет П Нога
 Тип _____ Час _____

Турнікет Л Нога
 Тип _____ Час _____

Ознаки та симптоми

Час				
Пулс				
Артеріальний тиск	/	/	/	/
Частота дихання				
Сатурація, %				
Рівень свідомості AVPU				
Шкала болю (0-10)				

TCCC

Номер операції: _____ Дата (дд-мм-рр): _____ Час: _____
 Евакуаційна категорія: ☐ Термінова ☐ Пріоритетна ☐ Звичайна
 ПІБ _____ Стать: ☐ Ч ☐ Ж
 Останні 4 цифри особистого номера _____
 Рід військ _____ Підрозділ _____ Алергії _____

Механізм травми (позначити все, що стосується даного випадку)
☐ Артилерійська ☐ Опік ☐ Тула ☐ Падіння ☐ Вогнепальна
☐ Саморобний вибух, пристр. ☐ Міна ☐ ДТП ☐ РПГ
☐ Інше _____

Поранення (позначити все, що стосується даного випадку)

Турнікет П Рука
 Тип _____ Час _____

Турнікет Л Рука
 Тип _____ Час _____

Турнікет П Нога
 Тип _____ Час _____

Турнікет Л Нога
 Тип _____ Час _____

Ознаки та симптоми

Час				
Пулс				
Артеріальний тиск	/	/	/	/
Частота дихання				
Сатурація, %				
Рівень свідомості AVPU				
Шкала болю (0-10)				




1 FICHE PATIENT A4 + 1 SACHET ZIP

ACTIONS

- plier en 4 la fiche patient
- la mettre dans sachet zip
- refermer sachet zip

B étape annexe

CRAYON PAPIER + SCOTCH US

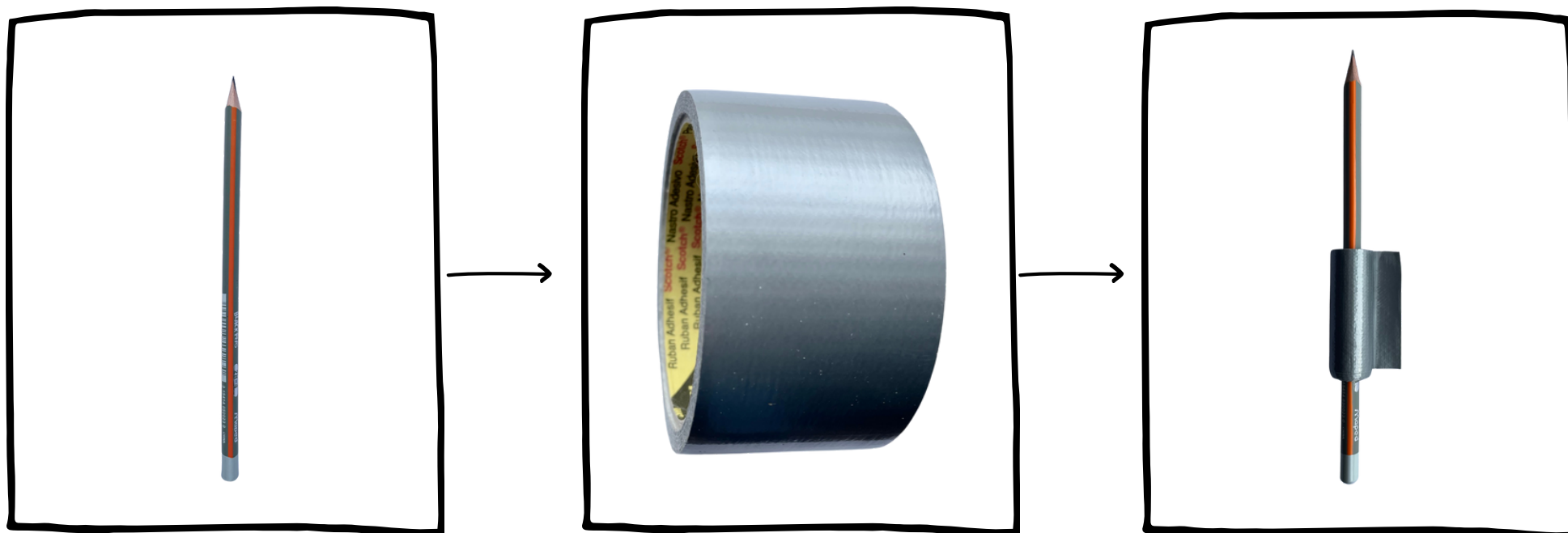

1 CRAYON PAPIER + SCOTCH US



ACTIONS

- découper 1 bande de scotch de 1 m de long
- enrouler le scotch autour du crayon

1

assemblage du kit

TROUSSE

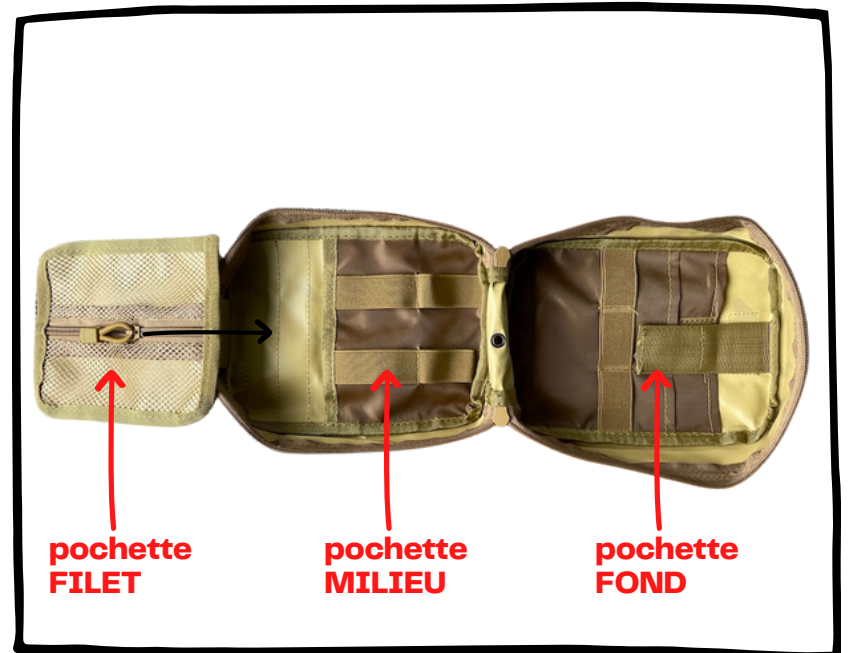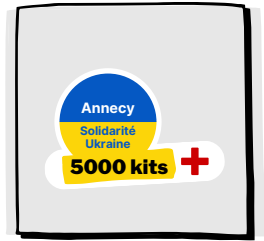

1 TROUSSE vide

ACTIONS

- enlever l'emballage plastique
- déplier la trousse

2

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FILET



2 paires de GANTS taille XL

- dans pochette FILET
- fermer la pochette avec le zip

3

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE MILIEU




1 FICHE PATIENT A4
dans sachet zip

• dans pochette MILIEU

4 assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE MILIEU

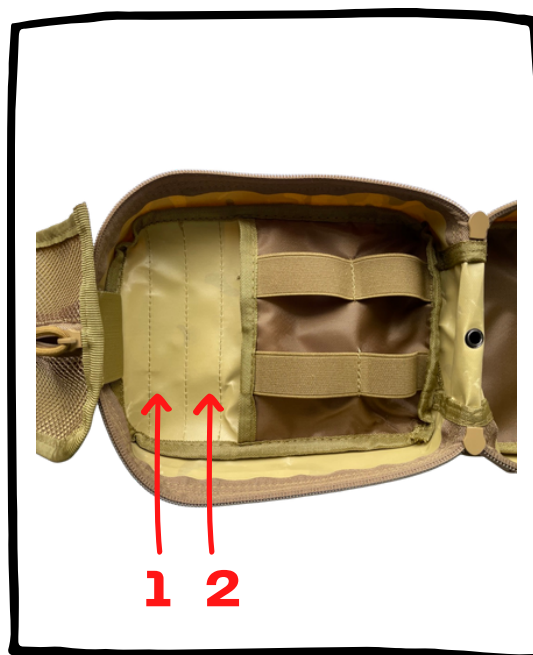

2 COMPRESSED GAUZE
mèche plate compressée



• dans pochette MILIEU

STERILE ne pas enlever l'emballage

5

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE MILIEU

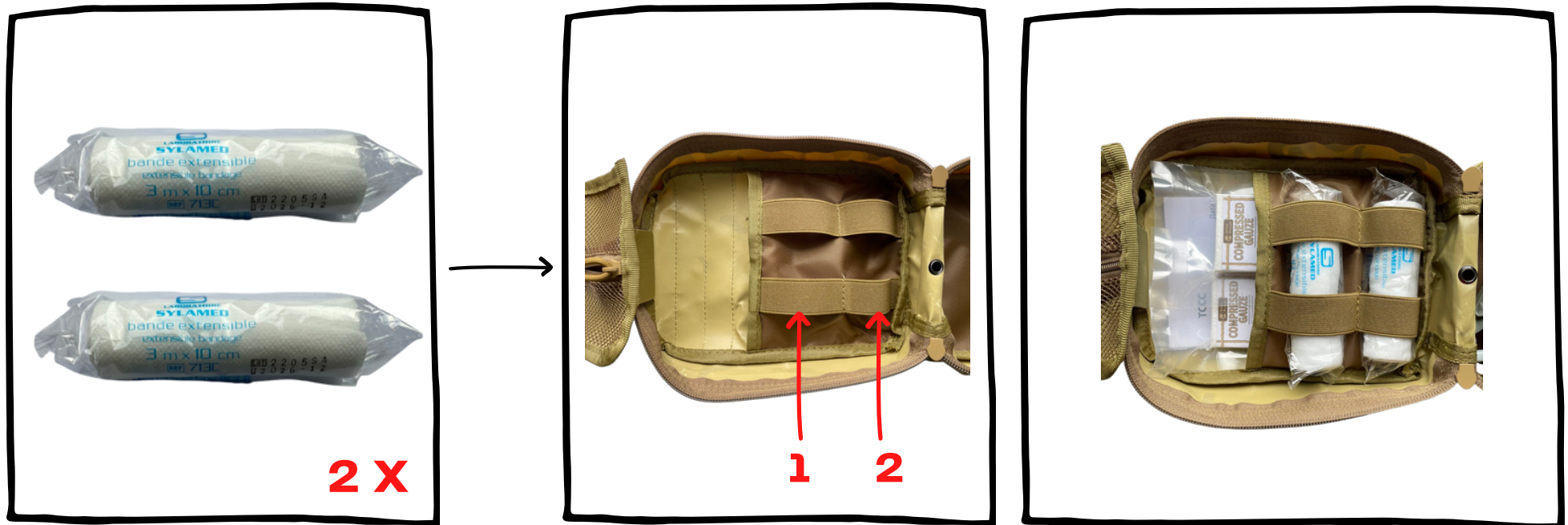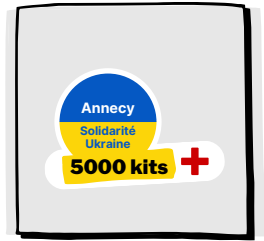

2 BANDES

ne pas enlever l'emballage
plastique


• dans pochette MILIEU

élastique 1 et 2

6

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE MILIEU

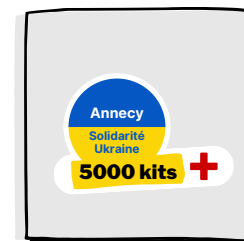

4 inches



1 EMERGENCY BANDAGE 4 inches

- dans pochette MILIEU
poser à la verticale à côté des bandes

STERILE ne pas enlever l'emballage

7

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND



1 BURN CARE

compresse d'hydrogel


• dans pochette FOND

STERILE ne pas enlever l'emballage

8

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND

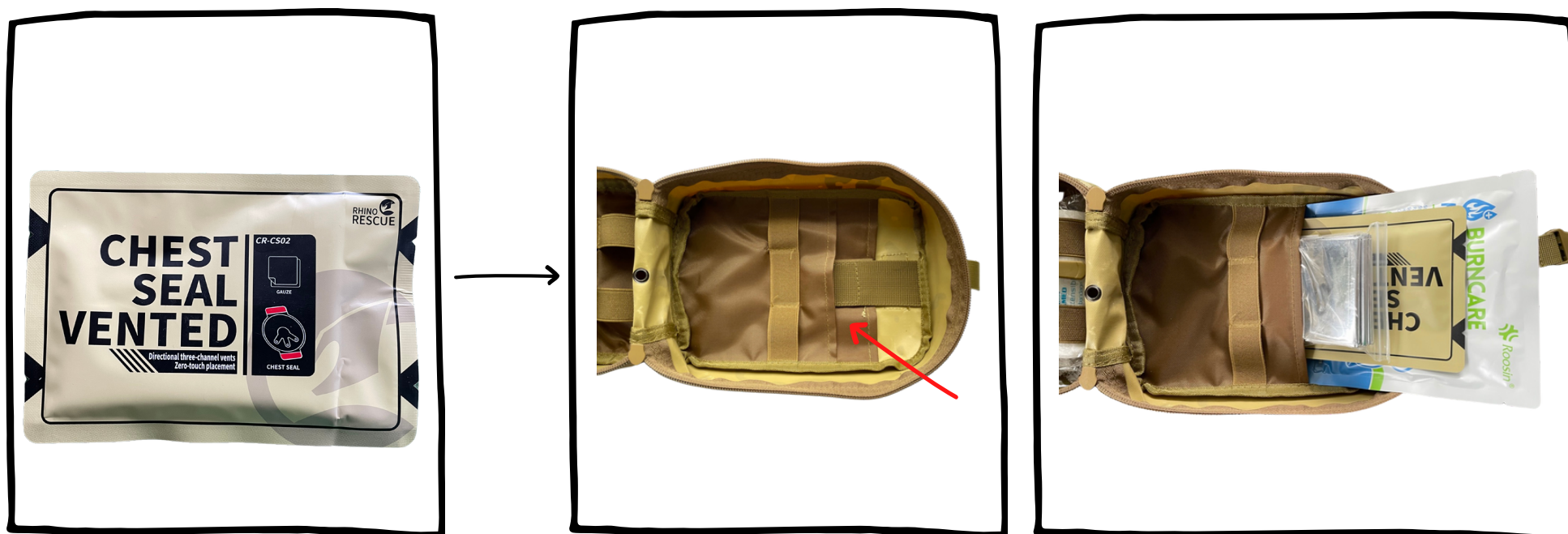

1 CHEST SEAL
pansement thoracique

• dans pochette FOND

STERILE ne pas enlever l'emballage

9

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND



1 SURVIVAL
BLANKET
1 couverture
de survie


ACTION
enlever l'emballage
carton

• dans pochette FOND

10

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND

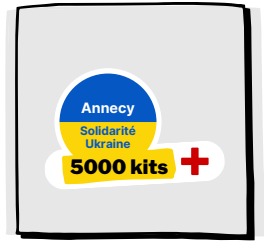

1 GARROT
Tourniquet



ACTION
enlever l'emballage
plastique



MILIEU



• dans pochette FOND
élastique MILIEU

11

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND



1 CISEAUX
Coupe-tout
"JESCO"


ACTION
enlever l'emballage
plastique

• dans pochette FOND
élastique en BAS

12

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND

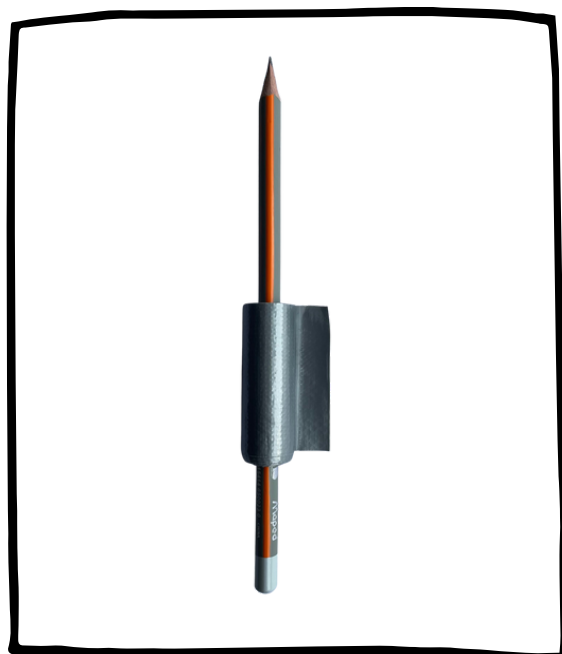

HAUT




1 CRAYON PAPIER + SCOTCH US
voir étape annexe

• dans pochette FOND
élastique en HAUT

13

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND

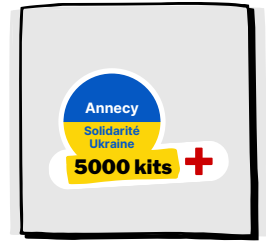

HAUT



1 MARQUEUR
permanent

ACTION
enlever l'emballage
plastique

• dans pochette FOND
élastique en HAUT

14

assemblage du kit

TROUSSE POCHETTE FOND



6 inches



1 EMERGENCY BANDAGE 6 inches


- dans pochette FOND
poser à l'horizontale au dessus des ciseaux

STERILE ne pas enlever l'emballage

15

assemblage du kit

TROUSSE FERMETURE

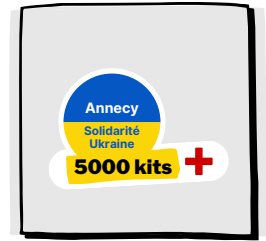

1 KIT COMPLET

ACTIONS

1. replier pochette filet sur pochette milieu
2. replier pochette milieu sur pochette fond
3. fermer l'ensemble avec les 2 zips
4. rabattre grosse sangle + velcro
5. clipser et ajuster sangle sur devant pochette

bravo !

